

SEALPRIM este un compozit nanohibrid transparent pentru etanșarea foselor și fisurilor, activat de lumină vizibilă.

INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE

1.



- Demineralizați suprafețele destinate sigilării cu ETCHGEL pentru 20-40 s, acordând o atenție deosebită plasării acestuia și în partea de jos a fisurii.

- Clătiți bine cu un flux puternic de apă și uscați cu atenție suprafața dintelui.

Dacă aspectul smalțului demineralizat nu este alb cretos, repetați procesul de demineralizare. Dacă apare o contaminare, suprafața trebuie demineralizată timp de aproximativ 10 sec.

2. SIGLAREA

- Aplicați bine SEALPRIM pe suprafața dintelui demineralizat
- Fotopolimerizați în conformitate cu tabelul de polimerizare.



A. După gravare

B. În timpul procedurii de sigilare

C. După procedura de sigilare

INDICAȚII DE UTILIZARE

- protejarea împotriva cariilor prin sigilarea fisurilor naturale, gropilor și foramina caeca pe suprafețele dintilor de foioase și permanente.

MD Dispozitiv medical clasa IIa

SEALPRIM este un material dentar polimer curgător clasa 2, care îndeplinește cerințele standardului ISO 6874.

SEALPRIM suferă o polimerizare radicală liberă activată de lumina vizibilă din regiunea albastră (400-500 nm).

TABEL DE POLIMERIZARE

Lamp	5 s	10 s
Halogen/LED (500-800 mW/cm ²)	2,0 mm	3,0 mm
LED (>800 mW/cm ²)	3,0 mm	4,0 mm

COMPOZIȚIE

Amestec de rășini dimetacrilat: BisGMA, TEGDMA, UDMA, BisEMA; umpluturi minerale (20% în greutate); stică Al-Ba-B-Si, silice fumată, fotoinitiator (CQ: DMAEMA). Dimensiunea particulelor de umplere anorganice este cuprinsă între 20 nm și 2,0 µm.

SEALPRIM nu necesită utilizarea unui sistem adeziv, cu toate acestea, dacă este necesar, poate fi utilizat cu orice sistem adeziv standard fotopolimerizabil.

CONTRAINDICAȚII

Nu utilizați SEALPRIM compozit la pacienții cu alergie cunoscută la oricare dintre componentele produsului.

REAȚII ADVERSE

Nu se cunosc reacții adverse. Cu toate acestea, o reacție alergică nu poate fi exclusă la persoanele deosebit de sensibile. În cazul oricărui reacții alergice, opriți utilizarea produsului.

LIMITĂRI DE UTILIZARE, INTERACȚIUNI

Nu folosiți dacă este imposibil să izolați complet zona de salivă, sânge sau umiditate. Contaminarea poate perturba procesul de polimerizare, afectând proprietățile mecanice ale materialului și scade eficiența de sigilare.

Nu folosiți cu materiale care conțin compuși fenolici, în special eugenol și timol. Astfel de materiale pot perturba polimerizarea compozitului.

PRECAUȚII

Evități contactul produsului nepolimerizat cu pielea, ochii și țesuturile moi ale gurii. În cazul unui astfel de contact, clătiți cu multă apă. În caz de simptome, consultați un medic, oferindu-i informații despre produs. Pentru a reduce riscul de contact, purtați întotdeauna echipamente de protecție personală, cum ar fi mănuși, măști pentru față și ochelari de siguranță.

În caz de alunecare sau aspirație în tractul respirator, solicitați asistență medicală imediată.

Pentru izolarea câmpului operator și protejarea pacientului, se recomandă utilizarea unui baraj de cauciuc.

Asigurați o polimerizare suficientă a întregului strat compozit, în special în locuri dificil de accesat. Produsul insuficient polimerizat poate fi alergenic.

În cazul contaminării unui compozit nepolimerizat, stratul de material contaminat trebuie îndepărtat. În caz de contaminare sau deteriorare mecanică a unui strat deja polimerizat, etanșați ușor suprafața acestuia și reaplicați compozitul. Fotopolimerizati în conformitate cu tabelul de polimerizare furnizat.

În cazul unei polimerizări insuficiente, îndepărtați stratul polimerizat incorrect și aplicați altul, vindecându-l corect. Evitați contaminarea suprafetei seringii (riscul de infecție încrucisată).

Atunci când aplicați SEALPRIM direct din seringă, din motive igienice, aplicatorul trebuie utilizat doar la un singur pacient.

Pentru a evita polimerizarea accidentală a compozitului în aplicator, trageți întotdeauna înapoi pistonul seringii imediat după utilizare.

AVERTIZĂRI

A nu se lăsa la îndemâna copiilor și a persoanelor neautorizate. A se proteja de lumină. Polimerizarea compozitului poate fi inițiată cu lumină ambientală sau cu o lampă de operare dentară. A se proteja de căldură. A se feri de îngheț. Utilizați în conformitate cu instrucțiunile producătorului. Nu folosiți după data de expirare.

DEPOZITARE

A se păstra la temperaturi sub 30°C. Nu vă expuneți la lumina directă a soarelui. Dacă este păstrat la o temperatură mai scăzută, reduceți la temperatura camerei înainte de utilizare. Pentru utilizare numai de către stomatologi și tehnicieni dentari.

GARANȚIE

ARKONA va înlocui produsele care s-au dovedit a fi defecte sau vor rambursa prețul achiziției. ARKONA nu răspunde pentru nicio pierdere sau daună cauzată de utilizarea necorespunzătoare sau utilizarea necorespunzătoare a produsului.

Instrucțiuni de utilizare emise la 24.02.2020



Laboratorium Farmakologii Stomatologicznej
Nasutów 99 C, 21-025 Niemce, EU



1639



DENTAL LIFE SCIENCES